

À retenir

Le résultat du FibroScan® permettra à votre médecin d'évaluer dans le temps l'état de santé de votre foie avec ou sans traitement.

L'examen FibroScan® ne sera pas réalisé :

- Sur un organe autre que le foie
- Sur les yeux et les muqueuses
- Sur les plaies
- Chez les patients ayant des dispositifs implantables actifs tels que pacemaker, défibrillateur, pompe...
- Chez les femmes enceintes
- Chez les patients ayant de l'ascite



Pour en savoir plus
Rapprochez-vous de votre
médecin traitant
ou de votre hépatologue.

INFORMATIONPATIENTFR0608012 - Version du 06/08/12 - Le FibroScan® est un dispositif médical fabriqué par Echosens. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Le FibroScan® est destiné à mesurer de façon non-invasive l'élasticité (E) et l'atténuation ultrasonore contrôlée (CAP) hépatique chez l'Homme.

Il est expressément recommandé de lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et l'étiquetage qui accompagnent le dispositif. Les examens doivent être réalisés uniquement par un opérateur certifié par le fabricant ou son représentant local accrédité. Le dispositif FibroScan® ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : organe autre que le foie, patients ayant des dispositifs implantables actifs (tels que pacemaker, défibrillateur, pompe, etc.), sur les plaies et chez les femmes enceintes. La présence d'ascite est susceptible d'empêcher l'obtention de mesures valides. Les valeurs obtenues doivent être interprétées par un médecin spécialiste des maladies du foie, en prenant en compte l'ensemble du dossier médical du patient.

1. Melin, P., et al., Dépistage non invasif de la fibrose : Intérêt du FibroScan® en consultation d'alcoologie [Noninvasive screening of fibrosis: interest of FibroScan® in alcohol addiction consultation]. *Alcoologie et Addictologie*, 2005;27:191-196.

2. Mueller, S. and L. Sandrin, Liver stiffness: a novel parameter for the diagnosis of liver disease. *Hepatic Medicine: Evidence and Research*, 2010: p. 49-67



FibroScan®
BY ECHOSENS
EN SAVOIR PLUS : WWW.ECHOSENS.COM



FLASHEZ CE CODE

INFORMATION PATIENT EXAMEN FIBROSCAN®



Un examen non-invasif,
rapide et indolore
de votre foie...

Connaissez-vous
le FibroScan® ?

FibroScan®



« *Rapide & sans anesthésie, le suivi de ma maladie avec FibroScan® est plus confortable.* »


FibroScan®, qu'est ce que c'est ?

Le diagnostic par FibroScan®, aussi appelé *élastographie impulsionnelle*, est une technique qui permet de déterminer la dureté du foie (exprimé en kPa équivalent de fibrose) sans pénétrer à l'intérieur du corps humain.

Le résultat est délivré immédiatement, il révèle l'évolution de l'état de santé du foie et permet au médecin de faire un diagnostic et un suivi, indépendamment des traitements ou facteurs périphériques.

Cela peut aider à anticiper diverses complications, à suivre et évaluer les dommages causés par la maladie telle que la cirrhose.

LA DURETÉ DU FOIE DÉTERMINE L'ÉTAT PATHOLOGIQUE

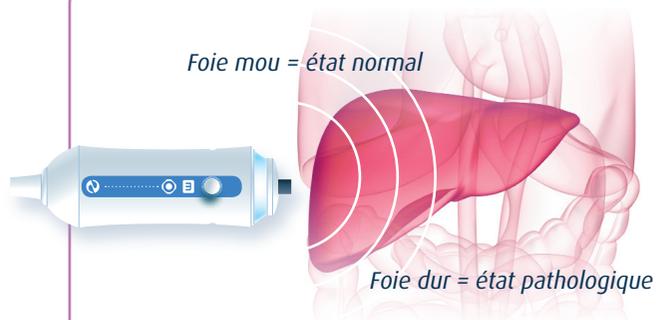

Le FibroScan® mesure la dureté du foie qui varie en fonction de l'inflammation des tissus et du taux de fibrose⁽²⁾.

Est-ce douloureux? Non.

L'examen FibroScan® est sans douleur et rapide. Au moment de la mesure, vous ressentirez une légère vibration au point de contact de la sonde sur la peau.

Comment se déroule l'examen FibroScan® ?

- Vous êtes allongé sur le dos, le bras droit relevé derrière la tête. Le médecin applique un gel à base d'eau sur la peau au niveau des côtes et positionne la sonde en exerçant une légère pression.
- L'examen comprend 10 mesures successives faites au même endroit.
- Le résultat est délivré en fin d'examen, c'est un chiffre qui correspond à la médiane en kPa entre 1,5 et 75. Il sera interprété par votre médecin.

Que fait-on du résultat ?

Votre médecin analyse le résultat (la médiane) à la lumière des données de votre dossier et en fonction de votre maladie.

Qui peut me prescrire l'examen FibroScan® ?

Votre médecin traitant ou votre hépatologue vous indiqueront le moment venu le lieu le plus adapté pour passer cet examen.



« *Lorsque mon médecin m'a proposé l'examen FibroScan®, j'ai immédiatement accepté.* »



« *Pour ma fille, j'ai choisi un examen sans douleur: le FibroScan®.* »

FibroScan®, ça change quoi pour moi ?

- Fibroscan® donne un résultat immédiat, c'est simple et rapide (5 -10 minutes).
- C'est un examen non invasif et sans douleur.
- En cas de surveillance étroite, l'examen peut être répété sans danger.



Les sondes du FibroScan® sont adaptées à la morphologie du patient



100% des patients acceptent l'examen FibroScan®⁽¹⁾